


Sitzrahmen

Lattoflex 270

Lattoflex 370

Lattoflex 970

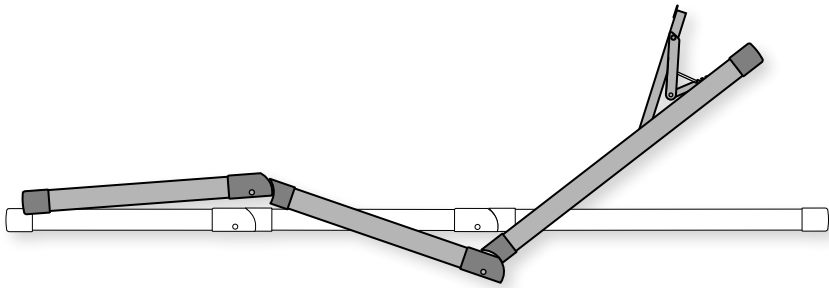

Montage- und Bedienungsanleitung

Wichtiges Dokument. Bitte sorgfältig aufbewahren.

Hier finden Sie weitere Informationen, Details und Videos zu Ihrem Produkt. Digitale Bedienungsanleitung:



www.lattoflex.com/service/x70


lattoflex[®]

Einbau und Bedienung

1 Einlegen in ein Bett

Seitliche Auflageleisten dürfen maximal 4 cm breit sein (Mittelzarge 8 cm). Da sich der Rahmen für die Sitzstellung im Gesäßbereich absenkt, müssen die Auflageleisten im Mittelbereich entfernt werden: Beginnend ca. 70 cm vom Kopfende auf einer Länge von 65 cm. Die Mittelzarge muss im gleichem Maß unterbrochen werden. Bei Bedarf bitte den Spezial-Einbausatz x70 verwenden (als Zubehör erhältlich).

Bei Betten mit Dreiecksauflagen (Schenkellänge max. 15 cm) bitte den Einbausatz „Verlängerungselemente“ verwenden (als Zubehör erhältlich).

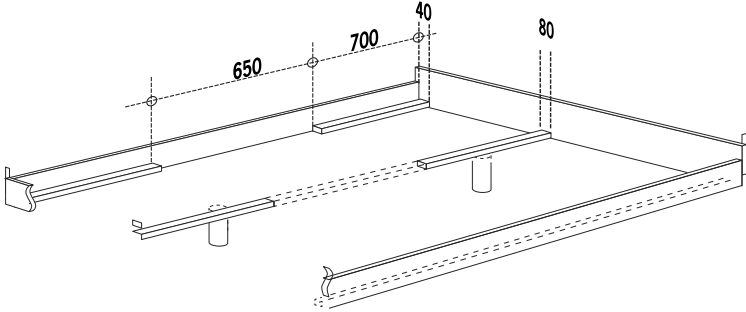


2 Stufenlose Sitzverstellung

a Sitzen: Bei angezogenem Griffgurt das Gesäß herunterdrücken und den Oberkörper anheben. Lassen Sie den Griffgurt los wenn Sie in der gewünschten Sitzposition sind.

b Liegen: Bei angezogenem Griffgurt Körper langsam strecken bis in die Flachlage. Griffgurt loslassen. Mit angewinkelten Beinen lässt sich der Rahmen leichter in die Flachlage bringen. Verlagern Sie dabei Ihr Gewicht auf Fersen und Oberkörper. Die Verstellung funktioniert optimal mit einer entsprechenden Lattoflex-Matratze. In der Liegeposition wird das Rückenteil durch einen Schnappmechanismus am Kopfende gesichert.

Verriegelung und Gasfeder werden gleichzeitig über den Griffgurt ausgelöst.

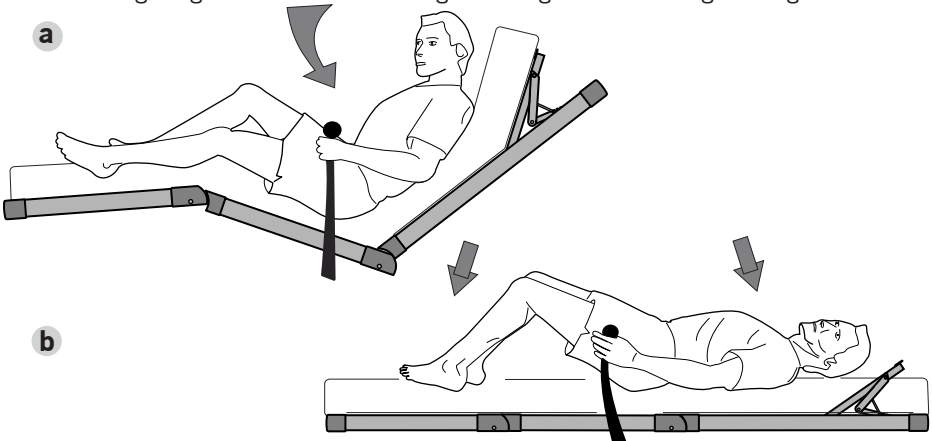


3**Bedienungsgurt - Verlegung auf die andere Bettseite**

Diese Arbeiten nur durch Fachpersonal ausführen lassen. Verletzungsgefahr!



Sprengring am Bolzen (A) hinter dem Auslösehebel (B) der Gasfeder (C) abziehen und den Bolzen aus der Führung drücken. Auslösegriff vorsichtig im Uhrzeigersinn um 180° drehen, die Gasfeder darf dabei nicht ausgelöst werden. Die Mutter (D) hinter dem Auslösegriff muss fest sitzen. Bolzen und Sprengring wieder einsetzen. Defekte Gasfedern nur durch Fachpersonal austauschen lassen.

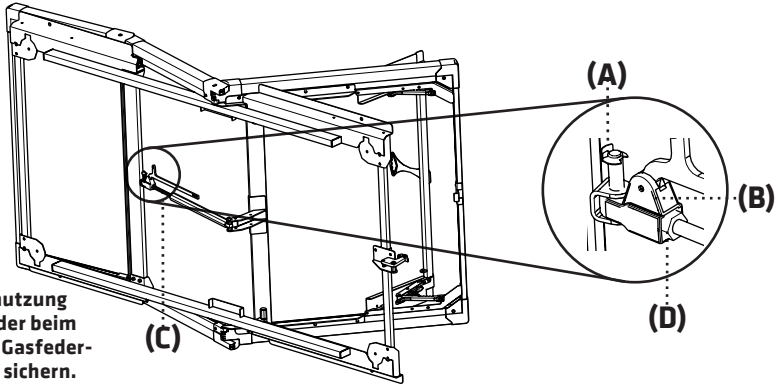

Achtung: Bei Benutzung ohne Matratze oder beim Transport ist der Gasfedermechanismus zu sichern.

4**Verriegelung - Einstellungen am Rast- und Federhaken**


Je nach Einbausituation oder nach einer gewissen Gebrauchszeit kann es vorkommen, dass der Schnappmechanismus am Kopfende eingestellt werden muss.

a Wenn die Verriegelung nur mit großem Druck auf das Rückenteil einrastet: Den festen Rasthaken länger einstellen. Dazu den Rahmen in Sitzposition bringen. Kopfverstellung hochstellen. Mit einem Inbusschlüssel SW5 die beiden Schrauben **(E)** am Rasthaken lösen. Rasthaken einstellen und Schrauben wieder festziehen. Funktion testen und ggf. nachjustieren.

b Wenn der Federhaken zu knapp auf den Rasthaken greift und das Rückenteil unbeabsichtigt hoch federt: Kontermutter **(F)** am Seilzug lösen. Gewindestift einige Umdrehungen raus drehen (dadurch wird das Seil verlängert). Kontermutter wieder anziehen. Funktion testen und ggf. nachjustieren.

Siehe Skizze auf der Rückseite!

5 Verriegelung - Einstellungen am Rast- und Federhaken

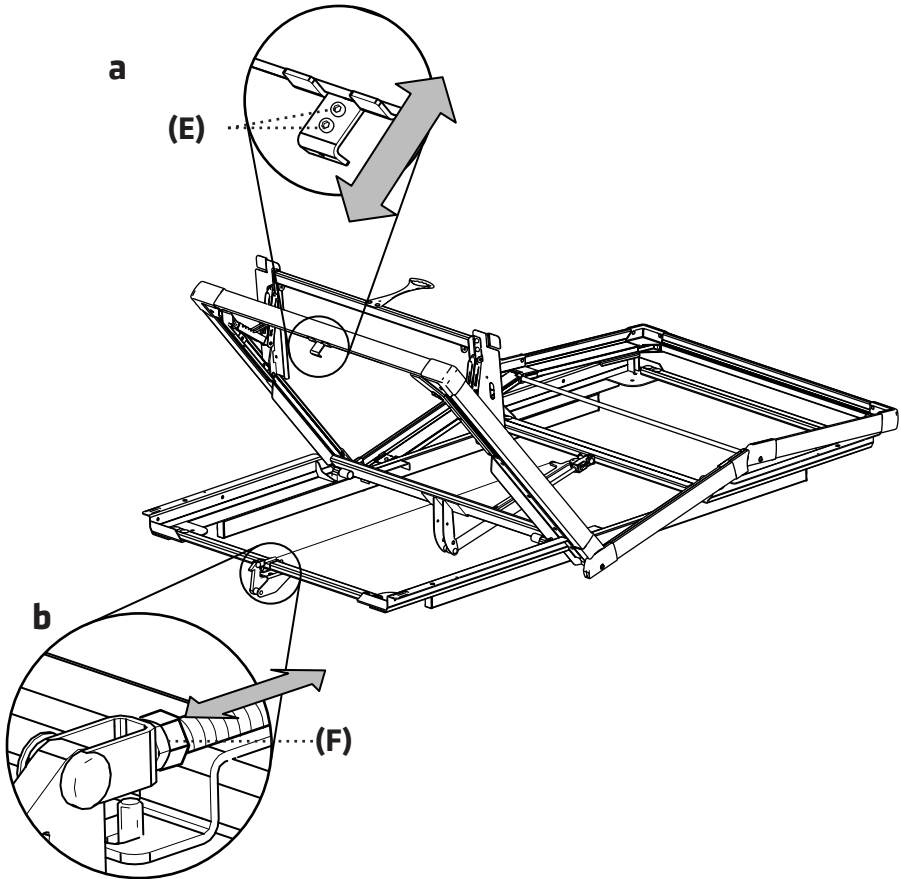

Sicherheitshinweise

Bei bestimmungsgemäßer Betätigung besteht keine Einklemm- oder Quetschgefahr. Achten Sie darauf, dass bei Betätigung des Rahmens keine Person, insbesondere keine Kinder unter dem Rahmen befinden oder in den Mechanismus hineingreifen. Während der Betätigung und in hochgestelltem Zustand nicht auf den Rahmen steigen. Bei Benutzung ohne Matratze oder beim Transport ist der Gasfedermechanismus zu sichern.